

**Стол инструментальный из нержавеющей стали для операционных и перевязочных
СИх-«ЭЛЕКТРА»
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.30-008-39548518-2022
МПЭЛ.942819.008 ХХ.11**

Столы СИх-«ЭЛЕКТРА» представляют собой медицинские изделия многоразового применения, предназначенные для размещения медицинского инструмента, медицинских приборов, перевязочного материала в стационарных и лечебно-профилактических учреждениях различного профиля при профилактике, диагностике, лечении и медицинской реабилитации. Область применения – хирургия.

Стол выполнен из высококачественной хромоникелевой нержавеющей стали, устойчивой к обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов.
«Стол инструментальный модели СИх-«ЭЛЕКТРА»-ХХ.ХХ.» (первые две цифры определяют размер полки, третья цифра - количество полок, 4 цифра тип опор: 1 – колесная, 2 – регулируемая.

Столы с одной полкой на колесных опорах

№ п/п	Наименование модели	Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Масса стола кг
1	СИх-«ЭЛЕКТРА»-01.11	800	600	850	16
2	СИх-«ЭЛЕКТРА»-02.11	800	700	850	17
3	СИх-«ЭЛЕКТРА»-03.11	800	800	850	18
4	СИх-«ЭЛЕКТРА»-04.11	1000	600	850	18
5	СИх-«ЭЛЕКТРА»-05.11	1000	700	850	19
6	СИх-«ЭЛЕКТРА»-06.11	1000	800	850	20
7	СИх-«ЭЛЕКТРА»-07.11	1200	600	850	19,5
8	СИх-«ЭЛЕКТРА»-08.11	1200	700	850	20,7
9	СИх-«ЭЛЕКТРА»-09.11	1200	800	850	22
10	СИх-«ЭЛЕКТРА»-10.11	1400	600	850	22
11	СИх-«ЭЛЕКТРА»-11.11	1400	700	850	23,7
12	СИх-«ЭЛЕКТРА»-12.11	1400	800	850	25,5
13	СИх-«ЭЛЕКТРА»-13.11	1600	600	850	25
14	СИх-«ЭЛЕКТРА»-14.11	1600	700	850	26
15	СИх-«ЭЛЕКТРА»-15.11	1600	800	850	27
16	СИх-«ЭЛЕКТРА»-16.11	1800	600	850	30
17	СИх-«ЭЛЕКТРА»-17.11	1800	700	850	31,7
18	СИх-«ЭЛЕКТРА»-18.11	1800	800	850	33,5
19	СИх-«ЭЛЕКТРА»-19.11	2000	600	850	32
20	СИх-«ЭЛЕКТРА»-20.11	2000	700	850	33,5
21	СИх-«ЭЛЕКТРА»-21.11	2000	800	850	35

Стол должен выдерживать равномерно распределенную нагрузку, максимальная нагрузка на полку 20 кг. Средний срок службы стола должен быть не менее 8 лет.

Устройство изделия

Стол представляет собой подвижный каркас на колесных опорах диаметром 75 мм, два из которых с тормозом, выполненный из нержавеющей стали и прошедший электрохимическую полировку. На каркасе располагается одна полка, выполненная из листовой зеркальной нержавеющей стали толщиной. Поворотные колеса обеспечивают легкость перемещения в зоне эксплуатации, а тормоза надежность при стационарном использовании.

Подготовка к работе

Распакуйте стол очистите его от упаковочного материала и защитной пленки. Удалите смазку марлевым тампоном, смоченным спиртом или другим моющим средством. Проведите дезинфекцию стола дезсредствами, утвержденными в установленном порядке.

Порядок работы

Стол поставляется в собранном виде, и после подготовки к работе готов к эксплуатации.

Объем работ	Методика технического обслуживания
1. Внешний вид	Осмотр стола на отсутствие внешних повреждений
2. Усилия, прилагаемые для перемещения стола на колёсных опорах	Усилие, необходимое для перемещения столов на колёсных опорах с равномерно распределенной по панели 1,5-кратной номинальной нагрузкой по твердой плоской поверхности, не должно превышать 100 Н (10 кгс). Проверяют динамометром по ГОСТ 13837-79

Ремонт

Наименование неисправности, внешние проявления и дополнительные признаки	Вероятная причина	Метод устранения
Большой люфт колёсных опор	Ослаб винт, соединяющий колёсную опору с ножкой стола.	Подтянуть винт
Усилия, прилагаемые для перемещения стола на колёсных опорах превышают установленную норму или одно из колес вращается с заметным усилием	Выработка (разрушение) подшипника колёсной опоры	Заменить колёсную опору на новую.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие качества стола **СИХ-01-«ЭЛЕКТРА»** в течение всего срока годности требованиям технических условий **ТУ 32.50.30-008-39548518-2022**, национальных стандартов и документации производителя при соблюдении правил транспортирования, хранения и правильного применения.

Изготовитель не несет ответственности за причиненный вред, который был нанесен самостоятельной модернизацией или неквалифицированным использованием изделия.
Гарантийный срок – 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию. Гарантийный срок хранения изделия – 1 год с даты выпуска.

Производитель имеет право без согласования вносить конструктивные изменения, улучшающие функциональность изделия.

Свидетельство о приемке

Стол инструментальный из нержавеющей стали для операционных и перевязочных модели **СИХ-«ЭЛЕКТРА»** - _____ - 11, серийный номер б/н.
изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и действующих технических условий **ТУ 32.50.30-008-39548518-2022** и признан годным к эксплуатации

« _____ » _____ 20 ____ г.

(подпись)

(фамилия и инициалы)

МП

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

На ремонт (замену) в течение гарантийного срока
Стол инструментального СИХ-«ЭЛЕКТРА» - _____ - 11 по ТУ 32.50.30-008-39548518-2022
Зав. номер: б/н.

Дата выпуска: 02.2025 г.

Приобретен _____
(заполняется торгующей организацией, дата, подпись, штамп)

Введен в эксплуатацию _____
(дата подпись)

Принят на гарантийное обслуживание _____
(заполняется ремонтным предприятием)

подпись и печать
руководителя
ремонтного предприятия

подпись и печать
руководителя
учреждения владельца