

**Стол инструментальный из нержавеющей стали для операционных и перевязочных
СИХ-«ЭЛЕКТРА»
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.30-008-39548518-2022
МПЭЛ.942819.008 ХХ.22**

Стол СИХ-«ЭЛЕКТРА» представляют собой медицинские изделия многоразового применения, предназначенные для размещения медицинского инструмента, медицинских приборов, перевязочного материала в стационарных и лечебно-профилактических учреждениях различного профиля при профилактике, диагностике, лечении и медицинской реабилитации. Область применения – хирургия.

Стол выполнен из высококачественной хромоникелевой нержавеющей стали, устойчивой к обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов.
«Стол инструментальный модели СИХ-«ЭЛЕКТРА»-ХХ.ХХ.» (первые две цифры определяют размер полки, третья цифра - количество полок, 4 цифра тип опор: 1 – колесная, 2 – регулируемая.

Стол с двумя полками на регулируемых опорах

1	СИХ-«ЭЛЕКТРА»-01.22	800	600	850	25
2	СИХ-«ЭЛЕКТРА»-02.22	800	700	850	27,5
3	СИХ-«ЭЛЕКТРА»-03.22	800	800	850	30
4	СИХ-«ЭЛЕКТРА»-04.22	1000	600	850	28
5	СИХ-«ЭЛЕКТРА»-05.22	1000	700	850	30,5
6	СИХ-«ЭЛЕКТРА»-06.22	1000	800	850	33
7	СИХ-«ЭЛЕКТРА»-07.22	1200	600	850	31,5
8	СИХ-«ЭЛЕКТРА»-08.22	1200	700	850	34,3
9	СИХ-«ЭЛЕКТРА»-09.22	1200	800	850	37
10	СИХ-«ЭЛЕКТРА»-10.22	1400	600	850	36
11	СИХ-«ЭЛЕКТРА»-11.22	1400	700	850	39
12	СИХ-«ЭЛЕКТРА»-12.22	1400	800	850	42
13	СИХ-«ЭЛЕКТРА»-13.22	1600	600	850	40
14	СИХ-«ЭЛЕКТРА»-14.22	1600	700	850	42
15	СИХ-«ЭЛЕКТРА»-15.22	1600	800	850	44
16	СИХ-«ЭЛЕКТРА»-16.22	1800	600	850	47,5
17	СИХ-«ЭЛЕКТРА»-17.22	1800	700	850	51,3
18	СИХ-«ЭЛЕКТРА»-18.22	1800	800	850	55
19	СИХ-«ЭЛЕКТРА»-19.22	2000	600	850	50
20	СИХ-«ЭЛЕКТРА»-20.22	2000	700	850	54
21	СИХ-«ЭЛЕКТРА»-21.22	2000	800	850	58

Стол должен выдерживать равномерно распределенную нагрузку, максимальная нагрузка на каждую полку 20 кг, на весь стол 40 кг. Средний срок службы стола должен быть не менее 8 лет.

Устройство изделия

Стол представляет собой каркас на регулируемых опорах, выполненный из нержавеющей стали и прошедший электрохимическую полировку. На каркасе располагается две полки, выполненная из листовой зеркальной нержавеющей стали.

Подготовка к работе

Распакуйте стол очистите его от упаковочного материала и защитной пленки. Удалите смазку марлевым тампоном, смоченным спиртом или другим моющим средством. Проведите дезинфекцию стола дезинфицирующими средствами, утвержденными в установленном порядке.

Порядок работы

Стол поставляется в собранном виде, и после подготовки к работе готов к эксплуатации.

Объем работ	Методика технического обслуживания
Внешний вид	Осмотр стола на отсутствие внешних повреждений
Проверка стола на отсутствие зазора между опорой и полом	Стол, оснащённый регулируемыми опорами, необходимо выставить в горизонтальное положение вращая нижнюю часть опоры до устранения зазора с полом.

Ремонт

Наименование неисправности, внешние проявления и дополнительные признаки	Вероятная причина	Метод устранения
Большой зазор между опорой и полом	Неотрегулированная опора.	Отрегулировать
Большое усилие прикладывается для вращения опоры	Нарушено резьбовое соединение	Заменить регулируемую опору на новую.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие качества стола **СИХ-01-«ЭЛЕКТРА»** в течение всего срока годности требованиям технических условий **ТУ 32.50.30-008-39548518-2022**, национальных стандартов и документации производителя при соблюдении правил транспортирования, хранения и правильного применения.

Изготовитель не несет ответственности за причиненный вред, который был нанесен самостоятельной модернизацией или неквалифицированным использованием изделия.
Гарантийный срок – 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию. Гарантийный срок хранения изделия – 1 год с даты выпуска.

Производитель имеет право без согласования вносить конструктивные изменения, улучшающие функциональность изделия.

Свидетельство о приемке

Стол инструментальный из нержавеющей стали для операционных и перевязочных модели **СИХ-«ЭЛЕКТРА»** - _____ - 22, серийный номер - б/н.
изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и действующих технических условий **ТУ 32.50.30-008-39548518-2022** и признан годным к эксплуатации

« _____ » _____ 20 _____ г.

(подпись)

(фамилия и инициалы)

МП

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

На ремонт (замену) в течение гарантийного срока
Стол инструментального СИХ-«ЭЛЕКТРА» - _____ - 22 по ТУ 32.50.30-008-39548518-2022

Зав. номер: б/н.

Дата выпуска: 02.2025 г.

Приобретен _____
(заполняется торгующей организацией, дата, подпись, штамп)

Введен в эксплуатацию _____
(дата подпись)

Принят на гарантийное обслуживание _____
(заполняется ремонтным предприятием)

подпись и печать
руководителя
ремонтного предприятия

подпись и печать
руководителя
учреждения владельца