

**Стол инструментальный из нержавеющей стали для операционных и перевязочных
СИХ-«ЭЛЕКТРА»
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.30-008-39548518-2022
МПЭЛ.942819.008 ХХ.21**

Стол СИХ-«ЭЛЕКТРА» представляют собой медицинские изделия многоразового применения, предназначенные для размещения медицинского инструмента, медицинских приборов, перевязочного материала в стационарных и лечебно-профилактических учреждениях различного профиля при профилактике, диагностике, лечении и медицинской реабилитации. Область применения – хирургия.

Стол выполнен из высококачественной хромоникелевой нержавеющей стали, устойчивой к обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов.
«Стол инструментальный модели СИХ-«ЭЛЕКТРА»-ХХ.ХХ.» (первые две цифры определяют размер полки, третья цифра - количество полок, 4 цифра тип опор: 1 – колесная, 2 – регулируемая.

Стол с двумя полками на колесных опорах

1	СИХ-«ЭЛЕКТРА»-01.21	800	600	850	25
2	СИХ-«ЭЛЕКТРА»-02.21	800	700	850	27,5
3	СИХ-«ЭЛЕКТРА»-03.21	800	800	850	30
4	СИХ-«ЭЛЕКТРА»-04.21	1000	600	850	28
5	СИХ-«ЭЛЕКТРА»-05.21	1000	700	850	30,5
6	СИХ-«ЭЛЕКТРА»-06.21	1000	800	850	33
7	СИХ-«ЭЛЕКТРА»-07.21	1200	600	850	31,5
8	СИХ-«ЭЛЕКТРА»-08.21	1200	700	850	34,3
9	СИХ-«ЭЛЕКТРА»-09.21	1200	800	850	37
10	СИХ-«ЭЛЕКТРА»-10.21	1400	600	850	36
11	СИХ-«ЭЛЕКТРА»-11.21	1400	700	850	39
12	СИХ-«ЭЛЕКТРА»-12.21	1400	800	850	42
13	СИХ-«ЭЛЕКТРА»-13.21	1600	600	850	40
14	СИХ-«ЭЛЕКТРА»-14.21	1600	700	850	42
15	СИХ-«ЭЛЕКТРА»-15.21	1600	800	850	44
16	СИХ-«ЭЛЕКТРА»-16.21	1800	600	850	47,5
17	СИХ-«ЭЛЕКТРА»-17.21	1800	700	850	51,3
18	СИХ-«ЭЛЕКТРА»-18.21	1800	800	850	55
19	СИХ-«ЭЛЕКТРА»-19.21	2000	600	850	50
20	СИХ-«ЭЛЕКТРА»-20.21	2000	700	850	54
21	СИХ-«ЭЛЕКТРА»-21.21	2000	800	850	58

Стол должен выдерживать равномерно распределенную нагрузку, максимальная нагрузка на каждую полку 20 кг, на весь стол 40 кг. Средний срок службы стола должен быть не менее 8 лет.

Устройство изделия

Стол представляет собой подвижный каркас на колесных опорах диаметром 75 мм, два из которых с тормозом, выполненный из нержавеющей стали и прошедший электрохимическую полировку. На каркасе располагается две полки, выполненная из листовой зеркальной нержавеющей стали. Поворотные колеса обеспечивают легкость перемещения в зоне эксплуатации, а тормоза надежность при стационарном использовании.

Подготовка к работе

Распакуйте стол очистите его от упаковочного материала и защитной пленки. Удалите смазку марлевым тампоном, смоченным спиртом или другим моющим средством. Проведите дезинфекцию стола дезсредствами, утвержденными в установленном порядке.

Порядок работы

Стол поставляется в собранном виде, и после подготовки к работе готов к эксплуатации.

Объем работ	Методика технического обслуживания
1. Внешний вид	Осмотр стола на отсутствие внешних повреждений
2. Усилия, прилагаемые для перемещения стола на колёсных опорах	Усилие, необходимое для перемещения столов на колёсных опорах с равномерно распределенной по панели 1,5-кратной номинальной нагрузкой по твердой плоской поверхности, не должно превышать 100 Н (10 кгс). Проверяют динамометром по ГОСТ 13837-79

Ремонт

Наименование неисправности, внешние проявления и дополнительные признаки	Вероятная причина	Метод устранения
Большой люфт колёсных опор	Ослаб винт, соединяющий колёсную опору с ножкой стола.	Подтянуть винт
Усилия, прилагаемые для перемещения стола на колёсных опорах превышают установленную норму или одно из колес вращается с заметным усилием	Выработка (разрушение) подшипника колёсной опоры	Заменить колёсную опору на новую.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие качества стола **СИХ-01-«ЭЛЕКТРА»** в течение всего срока годности требованиям технических условий **ТУ 32.50.30-008-39548518-2022**, национальных стандартов и документации производителя при соблюдении правил транспортирования, хранения и правильного применения.

Изготовитель не несет ответственности за причиненный вред, который был нанесен самостоятельной модернизацией или неквалифицированным использованием изделия.
Гарантийный срок – 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию. Гарантийный срок хранения изделия – 1 год с даты выпуска.

Производитель имеет право без согласования вносить конструктивные изменения, улучшающие функциональность изделия.

Свидетельство о приемке

Стол инструментальный из нержавеющей стали для операционных и перевязочных модели **СИХ-«ЭЛЕКТРА»** - _____ - 21, серийный номер б/н. _____
изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и действующих технических условий **ТУ 32.50.30-008-39548518-2022** и признан годным к эксплуатации

« _____ » _____ 20 ____ г.

(подпись)

(фамилия и инициалы)

МП

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

На ремонт (замену) в течение гарантийного срока
Стол инструментального СИХ-«ЭЛЕКТРА» - _____ - 21 по ТУ 32.50.30-008-39548518-2022
Зав. номер: б/н.
Дата выпуска: 02.2025 г.
Приобретен _____

(заполняется торгующей организацией, дата, подпись, штамп)

Введен в эксплуатацию _____
(дата подпись)

Принят на гарантийное обслуживание _____
(заполняется ремонтным предприятием)

подпись и печать
руководителя
ремонтного предприятия

подпись и печать
руководителя
учреждения владельца