

**Столики медицинские инструментальные из нержавеющей стали передвижные
СИ 2-01-«Электра» по ТУ 9452-003-39548518-2004
в следующем исполнении СИ 2-01(ЗН-1)**

**Паспорт
МПЭЛ.942819.003-13П**

НАЗНАЧЕНИЕ: Столик предназначен для размещения на нем инструмента и использования в стационарных и лечебно-профилактических учреждений различного профиля.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Наименование	Габаритные размеры, мм	Масса, кг
Столик СИ 2-01 (ЗН-1)	565x385x870* *в зависимости от поставляемых комплектующих размеры могут отличаться на 15 мм	9

Столик с тремя полками и одним ящиком СИ 2-01 (ЗН-1) является модификацией базовой модели СИ 2-01 -«Электра». Размер полки - 500x345 мм, размер ящика 335x220x60 мм. Столик должен выдерживать равномерно распределенную нагрузку массой 18 кг. Средний срок службы столика должен быть не менее 8 лет.

УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ. Столик представляет собой подвижный каркас на колесиках диаметром 50 мм, на котором располагаются три полки и один ящик на полозьях, выдвигающийся в обе стороны. Материал столика нержавеющая сталь. Поворотные колеса обеспечивают легкость перемещения в зоне эксплуатации, а тормоза надежность при стационарном использовании.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ. Распакуйте столик и очистите его от упаковочного материала. Удалите смазку марлевым тампоном, смоченным спиртом или другим моющим средством. Проведите дезинфекцию столика дезсредствами, утвержденными в установленном порядке.

ПОРЯДОК РАБОТЫ. Столик поставляется в собранном виде, и после подготовки к работе готов к эксплуатации.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Объем работ	Методика технического обслуживания
1. Внешний вид	Осмотр столика на отсутствие внешних повреждений
2. Усилия, прилагаемые для перемещения столика	Проверяют динамометром 2 класса точности по ГОСТ 13837-79 с пределом измерения 50н.

ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Наименование неисправности, внешние проявления и дополнительные признаки	Вероятная причина	Метод устранения
Большой люфт опор	Ослаб винт, соединяющий опору со стойкой	Подтянуть винт

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

Изготовитель гарантирует соответствие столика СИ 2-01 (ЗН-1)-«Электра» требованиям технических условий ТУ 9452-003-39548518-04 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения. Гарантийный срок - 24 месяца со дня передачи товара покупателю.

Гарантийный талон

На ремонт (замену) в течение гарантийного срока
Столика инструментального СИ 2-01 (ЗН-1)-«Электра»
ТУ 9452-003-39548518-04

Заводской номер: б/н. Дата выпуска: 03.2025 г.

Приобретен _____
(заполняется торгующей организацией, дата, подпись, штамп)

Введен в эксплуатацию _____
(дата подпись)

Принят на гарантийное обслуживание _____
(заполняется ремонтным предприятием)

подпись и печать
руководителя
ремонтного предприятия

подпись и печать
руководителя
учреждения владельца