



**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ЦИТО»Росздрава**

127299, Москва, ул.Приорова, 10 тел 450-39-11 факс 450-41-86

Код 04.04.049

ДЕРЖАВКА ГРУЗОВ

Державку грузов применяют для поддержания и направления шнура с грузами при лечении методом скелетного вытяжения.

1. Технические данные

1.1. Державка грузов изготовлена из нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72.

1.2. Габаритные размеры (мм): 640×50.

1.3. Державка грузов – коррозионностойка при условии соблюдения требований эксплуатации и хранения.

2. Состав изделия и комплект поставки

В комплект поставки входят:

- державка грузов ;
- паспорт — 1 экз.

3. Подготовка к работе

3.1. Провести расконсервацию и осмотр внешнего вида державки.

3.2. Перед применением и в процессе дальнейшей эксплуатации державку необходимо подвергнуть обработке дезинфицирующим раствором.

4. Устройство и методика применения

Державка грузов состоит из дисковой площадки и подвешного крюка, который подвешивается на шнур, пропущенный через блок и закрепленный в пружине скобы для скелетного вытяжения.

Для увеличения или уменьшения нагрузки соответственно добавляются или убираются грузы.

5. Консервация и хранение

5.1. Державка грузов упакована во ФГУП «ЦИТО» Росздрава для условий хранения 2(С): ВЗ-0, ВУ-1 по ГОСТ 9.014-78.

5.2. Державка должна храниться в закрытом помещении при температуре воздуха от -50°C до $+40^{\circ}\text{C}$ в упаковке предприятия-изготовителя, а в условиях эксплуатации может храниться и без упаковки.

5.3. Воздух помещения, в котором хранится державка, должен иметь нормальную влажность и не содержать коррозионно-активных примесей.

6. Свидетельство о приемке

Державка грузов соответствует требованиям ТУ 9452-155-01894927-98 и признан годным для эксплуатации.

Подпись _____

Штамп ОТК

Дата «___» _____ 200 г.

7. Гарантии изготовителя

7.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие держателя грузов ТУ 9452-155-01894927-98 при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения.

7.2. Гарантийный срок эксплуатации устанавливается — 12 месяцев, гарантийный срок хранения — 3 года.

7.3. В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель безвозмездно устраняет дефекты, возникшие по его вине, путем бесплатного ремонта или замены изделия.

7.4. Предприятие-изготовитель не несет ответственности за повреждение изделия в результате неправильной эксплуатации и хранения.